

# Gebruiksaanwijzing PatientMover



- Plaats de PatientMover zover mogelijk tegen de rolstoel.
- Laat, bij gebruik in combinatie met een bed, de patiënt eerst op de rand gaan zitten.
- Zet de PatientMover op de rem.

Verplaatsen van de patiënt kan staand of zittend. Staand:


- Plaats, voor staand vervoer, het losse deel achter de patiënt.
- In plaats hiervan kan ook gebruik gemaakt worden van een veiligheidsgordel.



Zittend gebruik:

- Plaats, wanneer deze staat, het zitgedeelte horizontaal achter de patiënt.
- Klap het leuningdeel omhoog.
- De patiënt kan nu gaan zitten.
- Plaats, wanneer de PatientMover als po-stoel gebruikt wordt, een ondersteek in de daarvoor aanwezige houder

- Behalve als po-stoel kan de PatientMover gebruikt worden voor zittend vervoer, b.v. voor verplaatsen naar het toilet.

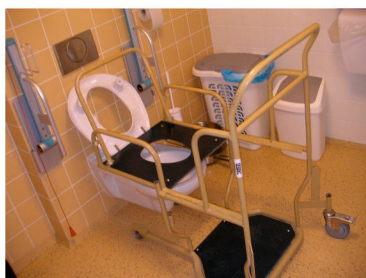

De patiënt kan met de PatientMover staand naar het toilet gereden worden en hier naar keuze, direct op het toilet gezet worden of met gebruik van het zitgedeelte.

Ook kan de patiënt zittend boven een toilet gereden worden. De PatientMover is geschikt voor zowel hangende als staande toilet potten.